


Návod na provedení rychlotestu - antigenní test Realy Saliva COVID Antigen Test – ze slin

Před testováním nechte testovací zařízení, vzorek a extrakční pufr ustálit na pokojovou teplotu (15–30°C). 10 minut před odběrem vzorku slin do úst nic nevkládejte, včetně jídel, nápojů, žvýkačky, tabáku, vody a výrobků na vyplachování úst (ústní voda).

1. Vyplivněte dostatek slin do pohárku/kapsy na sliny.
2. Vyjměte extrakční zkumavku a extrakční pufr, odlomte vrchní část lahvičky s extrakčním pufrům a nalejte veškerý extrakční pufr do extrakční zkumavky.
3. Vezměte kapátko a naberte dostatek slin z pohárku/kapsy. Přeneste všechny sliny z pipety do extrakční zkumavky.
4. Pomocí trysky a uzavřete extrakční zkumavku, jemně vertikálně protřeptejte extrakční zkumavkou po dobu asi 5 sekund, aby se sliny dobře promísily s extrakčním pufrům.
5. Použitý pohárek/kapsu přeložte na polovinu a uložte ji do plastového sáčku pro likvidace jako lékařský odpad v souladu s místními předpisy.



6. Vyjměte testovací zařízení z uzavřeného fóliového sáčku. Nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud je provedete test bezprostředně po otevření fóliového sáčku. Položte testovací zařízení na čistý a rovný povrch.
7. Přeneste 3 kapky vzorku do jamky na testovacího zařízení, kapátko držte svisle. Spusťte stopky.
8. Výsledek testu bude za 10 až 20 minut. Výsledek po 20 minutách již neodečítejte.

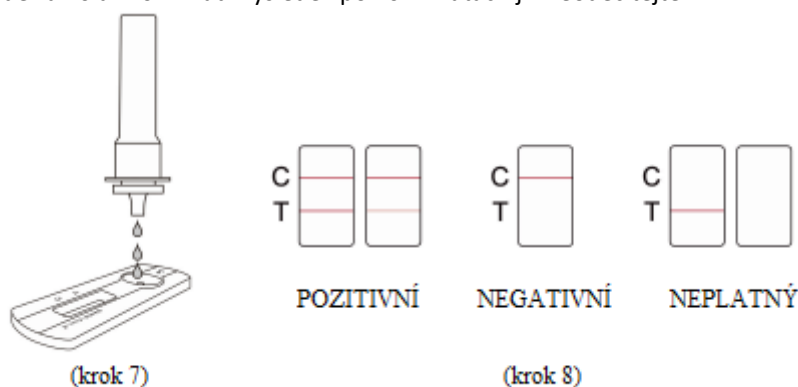

Vyhodnocení testu:

POZITIVNÍ: Objeví se dvě červené čáry. Jedna červená čára se objeví v kontrolní oblasti (C) a jedna červená čára v testovací oblasti (T). Barevný odstín se může lišit, ale vždy by měl být považován za pozitivní, i když se zobrazí slabá čára.

NEGATIVNÍ: V kontrolní oblasti (C) se objeví pouze jedna červená čára a v testovací oblasti (T) žádná čára. Negativní výsledek naznačuje, že ve vzorku nejsou žádné nové částice koronaviru nebo počet virových částic je pod detekovatelným rozsahem.

NEPLATNÝ: V kontrolní oblasti (C) se neobjeví žádná červená čára. Test je neplatný, i když je v testovací oblasti (T) čára. Nejpravděpodobnější důvodem neplatnosti testu je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávný postup. Zkontrolujte postup testu a opakujte test s novým testovacím zařízením. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte používat testovací soupravu a kontaktujte místní zastoupení distributora.

Výrobce: HANGZHOU REAL TECH CO., LTD. th Floor, #12 Building, Eastern Medicine Town, Xiasha Economic & Technology Development, 10018 Hangzhou, Zhejiang, P.R. China

Distributor: TPunix s.r.o. Brno - Veveří, Lidická 700/19, 602 00 IČ: 05257719 DIČ: CZ05257719, info@ipato.cz, +420 773 972 983